

DE


Informationen zum schwarzen Code-Chip


So verwenden Sie den **schwarzen** Code-Chip , der dieser Teststreifenpackung beiliegt:

- Der **schwarze** Code-Chip kann mit ALLEN Teststreifen verwendet werden, die für Ihr Messgerät geeignet sind. Der **schwarze** Code-Chip muss nicht mehr gewechselt werden, selbst wenn in neuen Teststreifenpackungen Code-Chips in anderen Farben oder mit anderen Code-Nummern enthalten sind.
- Stecken Sie den **schwarzen** Code-Chip in das Messgerät; entsorgen Sie alle Code-Chips, die Sie zukünftig erhalten.
- Überprüfen Sie das Haltbarkeitsdatum auf der Teststreifenpackung, bevor Sie eine Blutzuckermessung oder eine Funktionskontrolle durchführen. Verwenden Sie keine Teststreifen, deren Haltbarkeitsdatum überschritten ist.

DE

Wichtige Information zu Maltose

Für Selbstanwender: Diese Teststreifen sind mit einem grünen Symbol  gekennzeichnet, um sie von früheren Teststreifen zu unterscheiden, die eine klinisch relevante Interferenz mit Maltose aufwiesen.¹ Das grüne Symbol finden Sie auf der Teststreifenpackung und auf dem Etikett der Teststreifenpackung.

Für medizinisches Fachpersonal: Prüfen Sie stets, ob das Symbol  auf der Teststreifenpackung oder auf dem Etikett der Teststreifenpackung abgebildet ist, um sicherzugehen, dass eine klinisch relevante Interferenz mit Maltose ausgeschlossen ist.

Referenz:

1 Interne Daten