

Absauggerät

WEINMANN ACCUVAC Pro



Funktionskontrolle:

Fingertip mit Kappe und Daumen verschließen. Testtaste ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis ein Signalton ertönt. Die Anzeige Akkustatus zeigt den aktuellen Akkustatus an. Mit dem Signalton startet die automatische Funktionskontrolle und alle LEDs auf dem Bedienfeld leuchten kurz auf. Während der automatischen Funktionskontrolle (Dichtigkeit, System, Akku) blinken die LEDs der Ein-/Aus-Taste.

Die Funktionskontrolle ist bestanden wenn:

- ein Signalton ertönt
- die drei grünen Status LEDs der Funktionskontrolle leuchten

Patient	Sogstärke	Absaugkatheter
Neugeborenes + Säugling	- 0,2 bar (begrenzt auf)	schwarz (3,33 mm x 50 cm)
Kind + Erwachsener	- 0,8 bar (höchstmögliche Stufe)	rot (6,0 mm x 50 cm)